

USO CORRECTO DE GUANTES DESECHABLES

COLOCACIÓN



1
Antes de colocarlo, lávate las manos correctamente y asegúrate que estén completamente secas.



2
Si los guantes son ambidiestros, pueden ser usados en cualquier mano.



3
Coloque los 5 dedos en el puño y jale el puño sobre la muñeca.



4
Revise que tenga un ajuste seguro alrededor de la muñeca. El puño debe ajustar cómodamente alrededor de la muñeca.

RETIRO



5
Tómelo con la punta de los dedos por el puño.



6
Deslice suavemente hacia la punta de los dedos.




7
Introduzca los dedos por dentro del puño para tomarlo por la parte de adentro y volver a deslizar hacia la punta de los dedos.



8
Después de retirarlo deséchalo y lava tus manos con agua y jabón.

COVID-19
#QuédateEnCasa

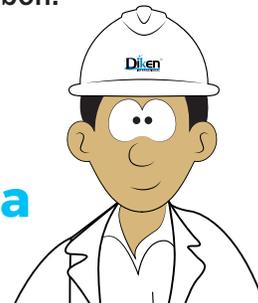

OFICINA CORPORATIVA MÉXICO

(844) 866 95 20

www.dikeninternational.com • comentarios@dikeninternational.com